


Communication COVID-19

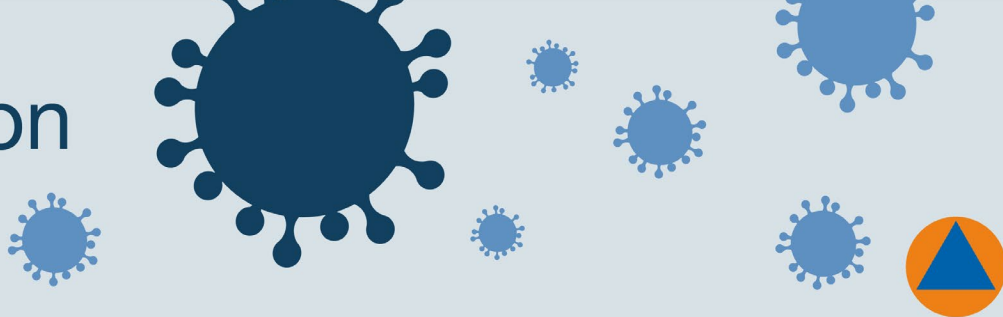

DESTINATAIRES : Tous les gestionnaires et employés des hôpitaux et des CHSLD du CISSS de Chaudière-Appalaches

DATE : Le 25 avril 2020

OBJET : Mesures de désinfection du cylindre de gaz médical et du chariot de transport contaminés par la maladie à coronavirus

Vous trouverez ci-joint deux procédures de désinfection, soit :

- Désinfection du chariot de transport à cylindre de gaz médical;
- Désinfection du cylindre à gaz médical et débitmètre.

À l'intérieur de chacune des procédures, vous avez l'équipement et les produits à utiliser pour la désinfection, la procédure de désinfection et une image visuelle pour bien procéder.

Il est important de respecter cette procédure de désinfection lorsque le matériel est contaminé par la maladie à coronavirus (COVID-19).

L'équipe de prévention et contrôle des infections

Contenu et diffusion approuvés par : Marco Bélanger

Coronavirus (COVID-19)

Avril 2020

TECHNIQUE

Mesures de désinfection du cylindre de gaz médical et du chariot de transport contaminés par la maladie à coronavirus (COVID-19)

DÉSINFECTION DU CHARIOT DE TRANSPORT À CYLINDRE DE GAZ MÉDICAL

Équipement et produits requis	✓ Linge de nettoyage OU ✓ Lingettes désinfectantes jetables (prêtes à l'emploi ou non) ✓ Désinfectant pour hôpitaux	Équipements de protection requis	✓ Gants de protection jetables à poignets longs ✓ Blouse de protection à manches longues ✓ Masque de procédure ✓ Protection oculaire : lunettes protectrices ou écran facial
--------------------------------------	---	---	--

Procédure	Visuellement
1. Procéder à l'hygiène des mains. 2. Revêtir l'équipement de protection individuelle recommandé selon la séquence indiquée. 3. Utiliser un linge de nettoyage imbibé de désinfectant pour hôpitaux OU une lingette désinfectante jetable pour nettoyer et désinfecter : • Les poignées de transport;  • L'ensemble des tiges;  • Les roues.  4. Déposer le linge de nettoyage utilisé dans un sac pour la buanderie OU déposer la lingette désinfectante jetable dans la poubelle. 5. Retirer l'équipement de protection individuelle selon la séquence indiquée. 6. Procéder à l'hygiène des mains.	

DÉSINFECTION DU CYLINDRE À GAZ MÉDICAL ET DÉBITMÈTRE

Équipement et produits requis	✓ Linge de nettoyage OU ✓ Lingettes désinfectantes jetables (prêtes à l'emploi ou non) ✓ Désinfectant pour hôpitaux	Équipements de protection requis	✓ Gants de protection jetables à poignets longs ✓ Blouse de protection à manches longues ✓ Masque de procédure ✓ Protection oculaire : lunettes protectrices ou écran facial
--------------------------------------	---	---	---

Procédure	Visuellement
1. Procéder à l'hygiène des mains. 2. Revêtir l'équipement de protection individuelle recommandé selon la séquence indiquée. 3. Utiliser un linge de nettoyage imbibé de désinfectant pour hôpitaux OU une lingette désinfectante jetable pour nettoyer et désinfecter : • Le cadran du débitmètre; ✖ • La valve du débitmètre; ✖ • Le protecteur du débitmètre (si applicable); ✖ • La poignée du support; ✖ • Le cylindre. ✖ <u>N.B.</u> : Si la bouteille est munie d'un robinet à ergots (« post pin-index valve »), désinfectez-le. 4. Déposer le linge de nettoyage utilisé dans un sac pour la buanderie OU déposer la lingette désinfectante jetable dans la poubelle. 5. Retirer l'équipement de protection individuelle selon la séquence indiquée. 6. Procéder à l'hygiène des mains. 7. Apposer l'étiquette sur les cylindres indiquant qu'ils ont été désinfectés. 8. Entreposer les cylindres désinfectés prêts à être ramassés dans une zone distincte.	  

Références

CHU DE QUÉBEC, Procédures internes de désinfection du cylindre de gaz médical et du chariot de transport, 2012, 2 p.

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX, *Mesures de désinfection terminale pour une chambre de patient confirmé ou suspecté de maladie à coronavirus (COVID-19), Type de précautions : gouttelettes-contact*, avril 2020, 4 p.