



## Prélèvement de la gorge et des 2 narines par écouvillonnage pour analyse avec la trousse ID NOW COVID-19



1. Pencher la tête de l'utilisateur vers l'arrière à un angle d'environ 70°.

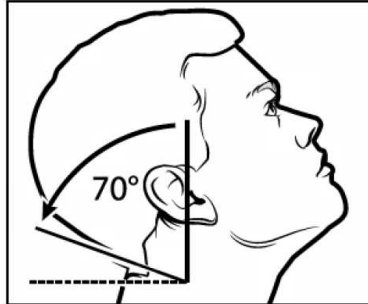

2. À l'aide de l'écouvillon fourni dans la trousse ID NOW COVID-19, écouvillonner le fond de la gorge et les amygdales.

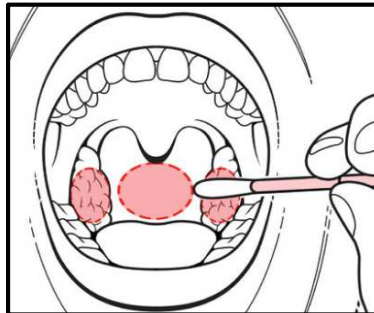

3. Insérer doucement le même écouvillon de 1 à 2 cm dans une narine antérieure jusqu'à rencontrer une résistance au niveau des cornets et effectuer une rotation contre la muqueuse nasale pendant 3 secondes.
4. Répéter dans l'autre narine.

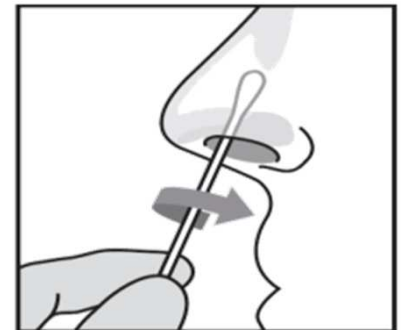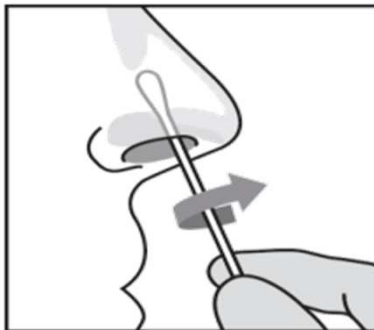

5. Procéder à l'analyse de l'écouvillon avec la trousse ID NOW COVID-19 selon les instructions du fabricant.