

Procédure de désinfection par l'utilisateur - **lunette de protection individuelle**



Vous devez désinfecter la lunette de protection lorsque :

- La lunette est souillée;
- Vous devez changer de masque de procédure;
- Vous changez de domicile (équipes du soutien à domicile);
- Vous retirez votre lunette (à plus de deux mètres de la clientèle, lors de la pause et du repas, à la fin du quart de travail).

Matériel nécessaire

- **Un évier avec du savon ou une solution hydro-alcoolique** (codes GRM : 50 ml : 11000082 | 400 ml avec pompe : 11018011 | recharge : 13800322)
- **Sacs refermables de type Ziploc** (code GRM : 10003032)
- **Gants** (codes GRM : petit : 11001838 | moyen : 11001839 | grand : 11001840 | très grand : 11001841)
- **Lingettes désinfectantes** (code GRM : 11200031)
- **Lingettes sèches** (code GRM : 13000774)

Processus de désinfection

- Procéder à l'hygiène des mains;
- Mettre les gants¹;
- Ouvrir le sac et enrouler le rebord pour qu'il demeure ouvert (pour l'entreposage ou en l'absence de poubelle);
- Ouvrir le couvercle des lingettes sèches;
- Ouvrir le couvercle des lingettes désinfectantes et sortir une lingette avec une main;
- Retirer la protection oculaire avec l'autre main et ne pas la déposer;
- Si la protection oculaire est souillée, retirer les salissures avec la lingette, jeter la lingette² et prendre une deuxième lingette pour l'étape suivante;



1. Les lingettes sont imbibées d'un produit corrosif qui nécessite le port de gants.

2. Pour la désinfection à l'extérieur des unités/installations, utiliser un sac refermable comme poubelle et en disposer lorsque possible.

Processus de désinfection (suite)

- Désinfecter la protection oculaire avec la lingette pendant le temps de contact¹ et bien nettoyer toutes les surfaces puis jeter la lingette;
- Sortir une lingette sèche du contenant, assécher complètement la lunette de protection et jeter la lingette;
- Remettre la lunette sur le visage ou la déposer dans le sac;
- Enlever les gants et les jeter;
- Fermer le sac refermable (pour l'entreposage ou en l'absence de poubelle);
- Procéder à l'hygiène des mains;
- Retirer le masque de procédure;
- Procéder à l'hygiène des mains.

1. Temps de contact des différentes lingettes désinfectantes

Modèles de lingette désinfectante	Temps contact
Diversey - Oxivir Tb Wipes / Essuie-tout (5144708)	1 min
3M - Lingettes nettoyantes et désinfectantes pour surfaces (HSW-100)	3 min
Maxill - tb Minuteman NEXGEN Disinfectant Wipes (61160)	3 min
Diversey - Accel PREvention Wipes (100906721)	3 min
Virox technologies inc. - Preempt Wipes (11221)	3 min

La lunette de protection rigide :

- Est autorisée en zone froide seulement.
Pour consulter [l'aide-mémoire détaillé](#).
- Doit se retrouver **devant vos yeux ou décontaminée dans un sac refermable**.

**En aucun temps,
vous ne devez porter votre
protection oculaire sur la tête.**

